



Biemme Group S.r.l.
Via Ugo la Malfa, 5
42048 Rubiera (RE) – Italia
Tel. +39 0522 1493390
www.biemmegroupsrl.it

Informazioni prevendita

INFORMAZIONI SULL'DISPOSITIVO ADATTE ALL'USO DA PARTE DI PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA, DI LETTURA O COGNITIVA

Ultima versione del Manuale d'Uso e Manutenzione in formato PDF può essere richiesta al Fabbrikante BIEMME GROUP SRL all'indirizzo commerciale@biemmegroupsrl.it e può essere stampato in formato più grande.

È possibile utilizzare la modalità "Lettura a voce alta", nel menu "Vista" del file PDF, per una migliore fruibilità.

USO PREVISTO

La **Carrozzina manuale ultraleggera FELIX** nasce dall'esigenza di creare una carrozzina superleggera per i più piccoli. E' stata progettata per dare l'opportunità di esplorare l'ambiente circostante in autonomia, per trovare occasioni di crescita e stimoli per l'apprendimento e l'esercizio delle proprie abilità

Il dispositivo è utilizzabile su bambini e ragazzi di età compresa tra 1 e 7 anni.

La portata massima del dispositivo è di 30 kg.

CONTROINDICAZIONI

L'utilizzo del Dispositivo Medico per eseguire operazioni diverse da quelle descritte nel manuale e nel presente documento è severamente vietato.

Questo dispositivo medico non può essere utilizzato nei casi in cui i bambini provino dolore o disagio che non può essere risolto mediante aggiustamenti delle regolazioni e/o della posizione nel dispositivo.

Questo dispositivo medico non può essere utilizzato nei casi di forti sollecitazioni meccaniche da parte dell'utente quali, per esempio, distonie o spasticità.

PRECAUZIONI

La scelta finale del tipo di Dispositivo Medico, delle opzioni e delle regolazioni spetta esclusivamente al professionista sanitario e al medico curante.

Consultare il proprio consulente sanitario affinché regoli i componenti del Dispositivo Medico ogni volta che si renda necessario apportare una modifica o regolazione.

Le modifiche non autorizzate e l'utilizzo di parti o accessori non forniti o approvati da BIEMME Group S.r.l. possono modificare la struttura del Dispositivo Medico. Ciò renderà nulla la garanzia e potrebbe comportare un rischio per la sicurezza.

Il Dispositivo interagisce con l'intero corpo dell'utente e deve essere regolato dall'operatore professionista per adattarlo al meglio alle caratteristiche dell'utente. Durante l'utilizzo del Dispositivo Medico, non lasciare mai l'utente senza supervisione.

Gli utenti devono sempre indossare i propri vestiti durante uso del Dispositivo.

AMBIENTE D'USO

Il dispositivo è progettato per il solo utilizzo in ambienti interni, quindi superfici piane e stabili come cemento e pavimentazioni. Il dispositivo è utilizzato in ambiente ospedaliero, ambulatoriale e domiciliare (compresi ambienti scolastici).

Prestare attenzione alla superficie sulla quale il dispositivo si muoverà. Controllare la possibile presenza di zone bagnate o scivolose.

Tenere lontano da fonti di calore (sollecitazioni termiche) quali, per esempio, l'abitacolo di una vettura sotto il sole, fiamme libere, sigarette, caminetti, caloriferi e radiatori.

Non utilizzare il dispositivo su terreni sabbiosi, cedevoli o rocciosi. Se si utilizzasse il dispositivo medico su terreni di questo tipo esiste il pericolo che viti e bulloni si allentino prematuramente e che i danni alle ruote mettano a rischio l'utente con cadute, ribaltamenti o perdita di controllo.

Non utilizzare il Dispositivo Medico in una doccia, una piscina o in un altro specchio d'acqua. Alcune parti del Dispositivo Medico non sono a prova d'acqua e potrebbero arrugginirsi o corrodersi dall'interno. Asciugare il Dispositivo Medico appena possibile se si bagna.



Informazioni prevendita

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Tutti gli interventi che vanno oltre le operazioni di assemblaggio, tutti i controlli periodici e straordinari, gli interventi di sostituzione delle parti strutturali, dei meccanismi e dei dispositivi relativi alla sicurezza dovranno essere svolte da personale autorizzato dalla ditta costruttrice (Biemme Group S.r.l.) o fornitore autorizzato. La manutenzione e tutte le riparazioni saranno eseguite in conformità con le istruzioni locali circa qualità e sicurezza, i requisiti della legge in vigore e commi aggiuntivi.

Leggere accuratamente le prescrizioni di Sicurezza nella PARTE 2: INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA del Manuale d'Uso e Manutenzione.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Una corretta Pulizia unitamente ad una corretta Manutenzione Periodica eseguita da personale autorizzato, garantirà un buon funzionamento del Dispositivo Medico e la sua durata nel tempo.

Il Dispositivo Medico è progettato in maniera tale da consentire agevolmente una completa pulizia.

Mantenere pulito il Dispositivo Medico per un funzionamento ottimale.

Leggere accuratamente le prescrizioni di Sicurezza in fase di pulizia riportate al paragrafo 2.3 NORME DI SICUREZZA IN FASE DI PULIZIA del Manuale d'Uso e Manutenzione.

Prima di ogni successivo utilizzo, ricordarsi di ripetere i controlli preliminari, nonché eseguire le operazioni di controllo e pulizia come riportato nella PARTE 6: CONTROLLO E PULIZIA del Manuale d'Uso e Manutenzione.

DIMENSIONI

www.biemmegroupsrl.it e seleziona il prodotto desiderato, oppure clicca qui:
[Scheda tecnica Felix.pdf](#)

PESO

www.biemmegroupsrl.it e seleziona il prodotto desiderato, oppure clicca qui:
[Scheda tecnica Felix.pdf](#)

ELENCO DEGLI ACCESSORI E PARTI STACCABILI

www.biemmegroupsrl.it e seleziona il prodotto desiderato, oppure clicca qui:
[Scheda ordine Felix.pdf](#)

USATO IN COMBINAZIONE CON ALTRI DISPOSITIVI

N/A

AVVERTENZE SULLE COMBINAZIONI PERICOLOSE

N/A

IMBALLO E TRASPORTO

Il dispositivo è imballato in maniera tale da ridurre al minimo possibili rischi da parte di eventuali contaminanti e residui di vario genere, che potrebbero arrecare danno al paziente, al personale sanitario e al personale incaricato al trasporto.

L'imballo è pensato in maniera tale da ridurre al minimo le sollecitazioni sul Dispositivo Medico da parte di fluttuazioni termiche e variazioni del grado di umidità, in modo da conservare le caratteristiche e le prestazioni del Dispositivo Medico durante il trasporto e l'eventuale breve stoccaggio.

Il Dispositivo Medico è fornito in stato di non sterilizzazione, ma conserva comunque l'integrità e la pulizia dello stesso.

Il dispositivo viene fornito intero oppure con le ruote di manovra smontate.

Il montaggio non necessita di nessuna attrezzatura e le ruote di manovra possono essere rimesse facilmente grazie al sistema di sgancio rapido presente sul perno. Per eseguire correttamente questa operazione, seguire gli step descritti nella PARTE 5: ISTRUZIONI DI PRIMO MONTAGGIO del Manuale d'Uso e Manutenzione.

Per lo smontaggio del dispositivo, eseguire le stesse operazioni indicate in questo capitolo, ma in ordine inverso.

Al termine dell'utilizzo del dispositivo medico è necessario procedere con il ricovero dello stesso in un posto asciutto dove non vi sono le fluttuazioni termiche e variazioni del grado di umidità e ad una eventuale protezione dagli agenti esterni, al fine di non compromettere il suo successivo utilizzo.